

Apresentação

As limas Flexicut® são fornecidas em blísteres plásticos com 6 unidades de limas de aço inoxidável, não estéreis.

Flexicut®

- V01 0064 021 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 21mm;
- V01 0064 021 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 21mm;
- V01 0064 021 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 21mm;
- V01 0064 021 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 21mm;
- V01 0064 021 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 21mm;
- V01 0064 021 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 21mm;
- V01 0064 021 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 21mm.
- V01 0064 025 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 25mm;
- V01 0064 025 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 25mm;
- V01 0064 025 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 25mm;
- V01 0064 025 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 25mm;
- V01 0064 025 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 25mm;
- V01 0064 025 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 25mm;
- V01 0064 025 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 25mm.

Composição

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Flexicut® foram projetadas com uma parte ativa de aço inoxidável DIN 1.4310, um stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.

Indicações de Uso

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Flexicut® são indicadas para utilização em tratamentos endodônticos convencionais de canais radiculares. Estes instrumentos devem ser utilizados apenas por dentistas treinados.

Contraindicações

Não se aplica.

Advertências

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Flexicut® são instrumentos exclusivos de uso odontológico e não devem ser utilizadas para outros fins.

Precauções

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Flexicut® podem ser reutilizadas (no máximo 8 vezes), devendo-se garantir que apenas procedimentos validados e equipamentos calibrados e submetidos regularmente à manutenção sejam utilizados na limpeza/desinfecção e esterilização das limas, a cada uso. Os procedimentos de limpeza e desinfecção são pré-requisitos essenciais para uma efetiva esterilização.

Efeitos Adversos

Não se aplica.

Instruções Passo a Passo

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Flexicut® são utilizadas no preparo dos canais radiculares nos tratamentos endodônticos. Durante a aplicação, a lima entra em contato apenas com a dentina que permanece no canal após sua utilização.

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Flexicut® são utilizadas para moldar o canal radicular em movimento de limagem (no máximo 45° no sentido horário) com uma habilidade de corte moderada. Devido à técnica de "Forças Balanceadas" recomendada, seu alargamento seguro preserva a forma natural do canal. A ponta inativa das limas Flexicut é utilizada para uma orientação mais segura através do canal radicular durante a sua preparação.

Flexicut®

Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis

Instruções de Uso

Cuidados de Conservação

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Flexicut® devem ser armazenadas em temperatura entre 0°-30°C, umidade relativa entre 50-60% e ao abrigo de radiação solar.

Lote: Vide Rótulo do Produto

Prazo de Validade: 10 anos.

VDW GmbH

Bayerwaldstr.15, D-81737 - Munique
Alemanha

Importado por:

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - CEP 13633412 - Pirassununga-SP
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira - www.dentsply.com.br
SAC: 0800 771 2226 | (11) 3046 2222 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396
Registro ANVISA nº 80196880347

Kendo® Flexicut

Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis

Instruções de Uso

Apresentação

As limas Kendo® Flexicut são fornecidas em blisters plásticos com 6 unidades de limas de aço inoxidável, não estéreis.

Kendo® Flexicut

- V20 0704 021 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 21mm;
- V20 0704 021 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 21mm;
- V20 0704 021 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 21mm;
- V20 0704 021 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 21mm;
- V20 0704 021 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 21mm;
- V20 0704 021 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 21mm;
- V20 0704 021 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 21mm;
- V20 0704 025 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 25mm;
- V20 0704 025 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 25mm;
- V20 0704 025 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 25mm;
- V20 0704 025 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 25mm;
- V20 0704 025 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 25mm;
- V20 0704 025 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 25mm;
- V20 0704 025 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 25mm.

Composição

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® Flexicut foram projetadas com uma parte ativa de aço inoxidável DIN 1.4310, um stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.

Indicações de Uso

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® Flexicut são indicadas para utilização em tratamentos endodônticos convencionais de canais radiculares. Estes instrumentos devem ser utilizados apenas por dentistas treinados.

Contraindicações

Não se aplica.

Advertências

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® Flexicut são instrumentos exclusivos de uso odontológico e não devem ser utilizadas para outros fins.

Precauções

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® Flexicut podem ser reutilizadas (no máximo 8 vezes), devendo-se garantir que apenas procedimentos validados e equipamentos calibrados e submetidos regularmente à manutenção sejam utilizados na limpeza/desinfecção e esterilização das limas, a cada uso. Os procedimentos de limpeza e desinfecção são pré-requisitos essenciais para uma efetiva esterilização.

Efeitos Adversos

Não se aplica.

Instruções Passo a Passo

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® Flexicut são utilizadas no preparo dos canais radiculares nos tratamentos endodônticos. Durante a aplicação, a lima entra em contato apenas com a dentina que permanece no canal após sua utilização.

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® Flexicut são utilizadas para moldar o canal radicular em movimento de limagem (no máximo 45° no sentido horário) com uma habilidade de corte moderada. Devido à técnica de "Forças Balanceadas" recomendada, seu alargamento seguro preserva a forma natural do canal. A ponta inativa das limas Flexicut é utilizada para uma orientação mais segura através do canal radicular durante a sua preparação.

VDW GmbH

Bayerwaldstr.15, D-81737 - Munique
Alemanha

Importado por:

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - CEP 13633412 - Pirassununga-SP
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira - www.dentsply.com.br
SAC: 0800 771 2226 | (11) 3046 2222 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396
Registro ANVISA nº 80196880347

Kendo[®] Flexicut

Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis

Instruções de Uso

Cuidados de Conservação

A Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo[®] Flexicut devem ser armazenadas em temperatura entre 0°-30°C, umidade relativa entre 50-60% e ao abrigo de radiação solar.

Lote: Vide Rótulo do Produto

Prazo de Validade: 10 anos.