


Elite Rock

Tixotrópico/Gesso extra duro tipo 4 para prótese fixa


INSTRUÇÕES DE USO

Zhermack
Dental


RELAÇÃO ÁGUA / PÓ	20 ml / 100 g
TEMPO DE TRABALHO	12'
TEMPO DE PEGA (VICAT)*	14'
COEFICIENTE DE EXPANSÃO 2h*	0,08 %
FORÇA DE COMPRESSÃO 1h*	52 Mpa

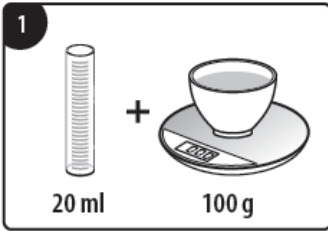


Relação água/pó

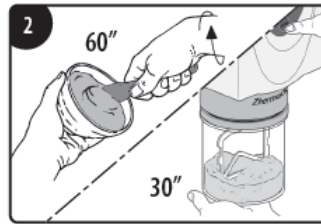

Mistura por 60/30 segundos

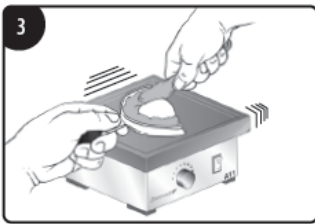

Derrame o gesso usando vibração

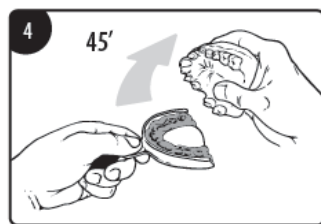

Tempo de remoção

COMPOSIÇÃO

ELITE ROCK SANDY BROWN: Gesso, Retardador, Sulfato de Potássio, Sal de Seignette, Plastificante, Acetato de vinila/copolímero de etileno, Pigmentos.

AVISO: Certifique-se de desinfetar adequadamente a impressão antes de despejar.

PRECAUÇÕES: Esteja ciente de que, durante o endurecimento, o material misturado pode desenvolver calor suficiente para causar queimaduras dérmicas. Não toque no material durante o endurecimento. Assegure ventilação adequada. Evite a formação de poeira e use proteção respiratória e ocular. Use luvas para evitar o contato prolongado ou repetido com a pele. Os tempos indicados podem variar de acordo com a temperatura ambiente e técnica de mistura. Gesso dentário. Este produto é sensível à umidade, armazene em local seco.

*Cumprido com a norma: ISO 6873

SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO

Zhermack S.p.A.
Via Bovazecchino, 100 | 45021
Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
info@zhermack.com | www.zhermack.com

2100-BRLAB-0016 [0]

Importado por:

Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda.
R. Senador Carlos Gomes de Oliveira, Nº 863, CD 02, Unidade 63 - Distrito Industrial
CEP: 88.104-785 - SÃO JOSÉ/SC CNPJ 12.483.930/0001-22;
www.dentsplysirona.com.br - SAC: 0800 771 2226 / (11) 3046-2222 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: João Gilberto Da Silva Zanuzzo - CRF/SC: Nº 8326
ANVISA Nº. Produto isento de registro de acordo com o MS.


Elite Arti

Tixotrópico/Gesso tipo 3 para articulante


INSTRUÇÕES DE USO

Zhermack
Dental


RELAÇÃO ÁGUA / PÓ	30 ml / 100 g
TEMPO DE TRABALHO	3'
TEMPO DE PRESA (VICAT)*	5'
COEFICIENTE DE EXPANSÃO 2h*	0,02 %
FORÇA DE COMPRESSÃO 1h*	26 MPa

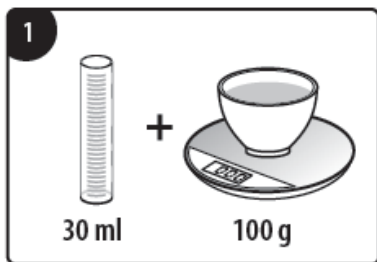

Relação água/pó

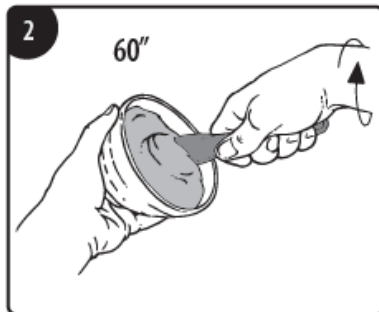

Mistura por 60 segundos

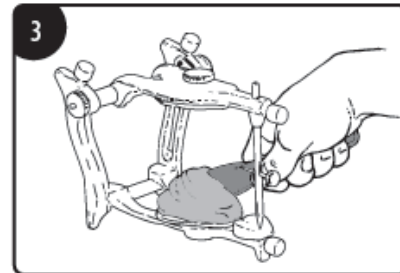

Colocar em articulador

COMPOSIÇÃO


ELITE ARTI WHITE: Gesso, Retardador, Sulfato de Potássio, Sal de Seignette e Plastificante.

AVISO: Certifique-se de desinfetar adequadamente a impressão antes de despejar.

PRECAUÇÕES: Esteja ciente de que, durante o endurecimento, o material misturado pode desenvolver calor suficiente para causar queimaduras dérmicas. Não toque no material durante o endurecimento. Assegure ventilação adequada. Evite a formação de poeira e use proteção respiratória e ocular. Use luvas para evitar o contato prolongado ou repetido com a pele. Os tempos indicados podem variar de acordo com a temperatura ambiente e técnica de mistura. Gesso dentário. Este produto é sensível à umidade, armazene em local seco.

*Cumpre com a norma: ISO 6873

SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO

 **Zhermack S.p.A.**
Via Bovazecchino, 100 | 45021
Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
info@zhermack.com | www.zhermack.com

2100-BRLAB-0015 [0]

Importado por:

Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda.
R. Senador Carlos Gomes de Oliveira, Nº 863, CD 02, Unidade 63 - Distrito Industrial
CEP: 88.104-785 - SÃO JOSÉ/SC CNPJ 12.483.930/0001-22;
www.dentsplysirona.com.br - SAC: 0800 771 2226 / (11) 3046-2222 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: João Gilberto Da Silva Zanuzzo - CRF/SC: Nº 8326
ANVISA Nº. Produto isento de registro de acordo com o MS.