

Apresentação

Gutapercha Acessória

21130270001-GT ACS 28mm R IND C120 XF; 21130270002 -GT ACS 28mm R IND C120 FF; 21130270003 -GT ACS 28mm R IND C120 MF; 21130270004 -GT ACS 28mm R IND C120 F; 21130270005 -GT ACS 28mm R IND C120 FM; 21130270006 -GT ACS 28mm R IND C120 M; 21130310001 -GT ACS 28mm R SORT C120 RS.

- Apresentações Individuais contendo 120 unidades nos tamanhos XF, FF, MF, F, FM e M
- Apresentação Sortida contendo 120 unidades, sendo 40 unidades do tamanho MF, 40 unidades do F e 40 unidades do FM.

Gutapercha Pontas (ISO Calibrada)

21130200001-GT ISO CAL SORT C120 15-40; 21130200002-GT ISO CAL SORT C120 45-80; 21130200006-GT ISO CAL SORT C120 25-30-35; 21130200007-GT ISO CAL SOR 120 25-30-35-40; 21130210001-GT ISO CAL C120 No15-CX C/120; 21130210002-GT ISO CAL C120 No20-CX C/120; 21130210003-GT ISO CAL C120 No25-CX C/120; 21130210004-GT ISO CAL C120 No30-CX C/120; 21130210005-GT ISO CAL C120 No35-CX C/120; 21130210006-GT ISO CAL C120 No40-CX C/120; 21130210007-GT ISO CAL C120 No45-CX C/120; 21130210008-GT ISO CAL C120 No50-CX C/120; 21130210009-GT ISO CAL C120 No55-CX C/120; 21130210010-GT ISO CAL C120 No60-CX C/120; 21130210011-GT ISO CAL C120 No70-CX C/120; 21130210012-GT ISO CAL C120 No80-CX C/120.

- Apresentações Individuais contendo 120 unidades nos tamanhos 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 e 80.
- Apresentações Sortidas contendo 120 unidades nas seguintes séries:
15-40 e 45-80: séries contendo 20 unidades de cada um dos tamanhos
25-30-35: série contendo 40 unidades de cada um dos tamanhos
25-30-35-40: série contendo 40 unidades dos tamanhos 25 e 30 e 20 unidades dos tamanhos 35 e 40

Gutapercha Pontas (ISO Calibrada Colorida)

21130020001-GT ISO COLOR INDIV 120 15; 21130020002-GT ISO COLOR INDIV 120 20; 21130020003-GT ISO COLOR INDIV 120 25; 21130020004-GT ISO COLOR INDIV 120 30; 21130020005-GT ISO COLOR INDIV 120 35; 21130020006 -GT ISO COLOR INDIV 120 40; 21130030001 -GT ISO COLOR SORTC/120 15-40; 21130030002 -GT ISO COLOR SORT C/120 45-80.

- Apresentações Individuais contendo 120 unidades nos tamanhos 15, 20, 25, 30, 35 e 40.
- Apresentações Sortidas contendo 120 unidades nas seguintes séries: 15-40 e 45-80, sendo que cada série contém 20 unidades de cada um dos tamanhos

Gutapercha Pontas .04

21130350001 -GT MAILLEFER ISO 04-SORT 15-40; 21130350004 -GT MAILLEFER ISO 04 -25; 21130350005 -GT MAILLEFER ISO 04 -30; 21130350006 -GT MAILLEFER ISO 04 -35; 21130350007-GT MAILLEFER ISO 04 -40.

- Apresentações Individuais contendo 60 unidades nos tamanhos 25, 30, 35 e 40
- Apresentação Sortida contendo 60 unidades da série 15-40, sendo 10 unidades de cada um dos tamanhos.

Gutapercha Pontas.06

21130360001 -GT MAILLEFER ISO 06-SORT 15-40; 21130360004 -GT MAILLEFER ISO 06 -25; 21130360005 -GT MAILLEFER ISO 06 -30; 21130360006 -GT MAILLEFER ISO 06 -35; 21130360007-GT MAILLEFER ISO 06 -40.

- Apresentações Individuais contendo 60 unidades nos tamanhos 25, 30, 35 e 40
- Apresentação Sortida contendo 60 unidades da série 15-40, sendo 10 unidades de cada um dos tamanhos

Gutapercha Protaper Universal

21130380001-GUTA PROTAPER F1; 21130380002-GUTA PROTAPER F2; 21130380003-GUTA PROTAPER F3; 21130380004-GUTA PROTAPER F1-F2-F3; 21130380005-GUTA PROTAPER F4; 21130380006-GUTA PROTAPER F5; 21130380007-GUTA PROTAPER F4-F5

- Apresentações Individuais contendo 60 unidades nos tamanhos F1, F2, F3, F4 e F5.
- Apresentações Sortidas contendo 60 unidades da série F4-F5 sendo 30 unidades de cada um dos tamanhos

DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial, Pirassununga - SP
CEP 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55

SAC: 0800 771 2226 | (11) 3046 2222 (Somente no Brasil)

ANVISA Nº 80196880235

Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396

Indústria Brasileira

1100-PIR-DFU 0045 - Rev01

- Apresentações Sortidas contendo 60 unidades da série F1-F2-F3, sendo 20 unidades de cada um dos tamanhos.

Composição

Guta Percha Sintética, Óxido de zinco, Pigmento*, Ácido Esteárico USP, Antioxidante Thiophenol, Sulfato de Bário Parafina, Estearato de Zinco, PEG 400

Indicações de Uso

As pontas de guta-percha são indicadas para obturação dos canais radiculares, após as etapas de preparo mecânico e químico do procedimento endodôntico auxiliando na obtenção de uma vedação completa e estanque do sistema de canais.

Contraindicações

Contraindicado às pessoas alérgicas a qualquer um dos componentes.

Advertências

O reuso desse produto aumenta o risco de contaminação assim como compromete o prognóstico do tratamento endodôntico;

A não desinfecção do dispositivo médico antes da sua inserção no canal radicular pode gerar reinfecção que implica em:

- desconforto para o paciente;
- necessidade de retratamento do canal radicular;
- Infecção com comprometimento da saúde do paciente;
- fragilidade do elemento dentário devido aos sucessivos retratamentos.

Precauções

- Inspeccionar a embalagem e produto antes do uso: se a embalagem ou produto estiver danificada, não usar o produto e descartá-lo;
- Não esterilizar (seguir protocolo de desinfecção indicado pelo Fabricante);
- Não usar soluções de desinfecção contendo fenol ou produtos os quais não são compatíveis com a guta-percha, como solventes.
- Use dique de borracha durante o procedimento endodôntico.

Efeitos adversos

Nenhuma reação adversa foi relatada até o momento.

Instruções Passo a Passo

As pontas de guta-percha só devem ser utilizadas em ambiente clínico ou hospitalar, por dentista qualificado. Após limpar e modelar o canal radicular, a técnica de obturação deve ser definida pelo profissional. Este procedimento inclui o uso de pontas de guta-percha e cimento obturador. As pontas de guta-percha selecionadas à obturação devem corresponder ao formato final (dimensões finais) do canal radicular preparado. Por serem inseridas diretamente no interior dos canais radiculares, devem ser obrigatoriamente desinfectadas antes do uso. As pontas de guta-percha devem ser desinfectadas antes do uso.

Limpeza, Desinfecção e Esterilização

As pontas de guta-percha devem ser desinfectadas antes do uso.

DENTSPLY Indústria e comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial, Pirassununga - SP

CEP 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55

SAC: 0800 771 2226 | (11) 3046 2222 (Somente no Brasil)

ANVISA Nº 80196880235

Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396

Indústria Brasileira

1100-PIR-DFU 0045 - Rev01

- Imergir o dispositivo de obturação em 5.25% NaOCL (Hipoclorito de Sódio) por 1 a 5 minutos à temperatura ambiente. Remova todas as bolhas da superfície do dispositivo médico.
- Cuidadosamente esfregue o dispositivo médico com gaze humedecida com álcool isopropílico 70%.
- Deixe o dispositivo de obturação secar ao ar livre.
- Não usar soluções de desinfecção contendo fenol ou produtos os quais não são compatíveis com a guta-percha.

Condições de Manipulação

- O produto deve ser descartado conforme regulamentações locais.
- A guta-percha deve ser manipulada apenas em clínicas ou ambiente hospitalar seguindo as boas práticas odontológicas, assim como ser utilizada por profissionais dentários qualificados tais como dentistas (clínicos gerais ou especialistas) ou auxiliares de saúde bucal, no assessoramento do procedimento endodôntico.

Cuidados de Conservação

Deve ser armazenado em local seco, ao abrigo da luz solar.

Informações Gerais

Nº do Lote: Vide Rótulo.

Prazo de Validade: 04 anos

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão dessas Instruções de uso com o produto adquirido indicado na embalagem. Para obter, sem custos, as Instruções de uso no formato impresso, solicite ao nosso SAC através do 0800 771 2226 (Somente no Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com

SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO
SOMENTE USO PROFISSIONAL
USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR
NÃO ESTÉRIL