

MAILLEFER

Conform Fit™

BR

Pontos de guta-percha

TRUNATOMY CONFORM FIT GUTTA-PERCHA
WAVEONE GOLD CONFORM FIT GUTTA-PERCHA
PROTAPER NEXT CONFORM FIT GUTTA-PERCHA

EXCLUSIVAMENTE PARA USO DENTÁRIO
SOMENTE USO PROFISSIONAL
NÃO ESTÉRIL
USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR

INSTRUÇÕES DE USO**Ref. B00WGGP, B00PNGP, B00PGGP, B00TNGP****CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

- B00WGGP - Caixa de plástico contendo 60 pontas de Gutta-Percha
- B00PNGP - Caixa de plástico contendo 60 pontas de Gutta-Percha
- B00PGGP - Caixa de plástico contendo 60 pontas de Gutta-Percha
- B00TNGP - Caixa de plástico contendo 60 pontas de Gutta-Percha

0) COMPOSIÇÃO

Componentes:

- Óxido de zinco
- Dióxido de titânio
- Gutta-percha sintética
- Sulfato de bário
- Agentes corantes
- Preenchimentos inertes

1) INDICAÇÕES DE USO

Os produtos devem ser usados apenas em um ambiente clínico ou hospitalar e por dentistas qualificados.

Área de aplicação: Obturador endodôntico. Esse produto é aceitável para todos os pacientes que precisam de tratamento de canal radicular. Indicado para ser o material predominante usado para obter ou preencher espaço do canal radicular limpo, instrumentado e irrigado durante o tratamento de canais radiculares.

A segurança e a eficácia do uso não foram estabelecidas em mulheres grávidas, lactantes ou em crianças.

2) CONTRAINDICAÇÕES

Nenhuma conhecida.

3) ADVERTÊNCIAS

Nenhuma conhecida.

4) PRECAUÇÕES

- Exclusivamente para uso dentário.
- Não deve ser esterilizado com calor.
- Manter afastado da luz solar e do calor.
- Manter sob temperatura ambiente (< 30°C (86°F)).
- Não use soluções desinfetantes que contenham fenol ou quaisquer outros produtos que não sejam compatíveis com o material de obturação tratado.

5) REAÇÕES ADVERSAS

Até o momento não foi relatada qualquer reação adversa.






6) INSTRUÇÕES PASSO A PASSO





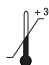




O material deve ser usado apenas por dentistas qualificados e familiarizados com as técnicas e procedimentos de uso. Após a instrumentação e limpeza do canal radicular, a técnica de obturação deve ser definida pelo profissional. Este procedimento inclui o uso de selador e cones de guta-percha. O cone principal corresponde ao primeiro cone a ser introduzido no canal e deve ser selecionado com o mesmo calibre do último instrumento usado na preparação para garantir a vedação apical. Outros cones podem ser inseridos no canal dependendo da técnica usada pelo profissional. Pode-se usar um instrumento aquecido para amolecer o material e garantir uma vedação e uma adaptação perfeitas do canal radicular.

7) DESINFECÇÃO

Mergulhe os dispositivos de obturação em uma solução de 5,25% de NaOCl por 1 a 5 minutos em temperatura ambiente. Limpe suavemente a guta-percha com gaze esterilizada e umedecida com álcool isopropílico 70%. Não use soluções desinfetantes que contenham fenol ou quaisquer outros produtos que não sejam compatíveis com o material de obturação tratado.

A validade do produto é de 4 anos (antes do primeiro uso) se armazenado em temperatura máxima de 30°C. O produto deve ser descartado conforme regulamentações locais.

Símbolos	BR
	Número de catálogo
	Data de validade
	Data de fabricação
	Fabricante
	Número de lote

Símbolos	BR
	Exclusivamente para uso único
	Não restituível se o selo estiver danificado
	Manter seco
	Guardar em local fresco e seco
	Limite de temperatura
	Não esterilizar com vapor
	Este produto não contém látex de borracha natural
	Guta-percha
	Marca CE

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão dessas Instruções de uso com o produto adquirido indicado na embalagem.

Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao nosso SAC através do 0800 771 2226 (Somente no Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com

Importado por: DENTSPLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua José Francisco de Souza, 1926 – Pirassununga, SP

CEP 13633-412 - CNPJ. 31.116.239/0001-55 – Indústria Brasileira

www.dentsplysirona.com.br – SAC 0800-771-2226 / (11) 3046-2222 (Brasil)

Resp. Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ/SP 04208396

ANVISA Nº: 80196880442 (Trunatomy), 80196880343 (WaveOne Gold), 80196880356 (ProTaper Next)

Fabricante



Mallefer Instruments Holding Sàrl

Chemin du Verger, 3

CH-1338 Ballaigues

Suíça

dentsplysirona.com

MAILLEFER

Conform Fit™

Pontos de guta-percha

END-IFU-GUTTA-PERCHA-POINTS-CONFORM-FIT-V02-WEB-EUR-multilingual-2021-05

20/20