

# Kendo® Hedstroem

Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis

Instruções de Uso

## Apresentação

As limas Kendo® Hedstroem são fornecidas em blisters plásticos com 6 unidades de limas de aço inoxidável, não estéreis.

Kendo® Hedstroem

- V20 0707 021 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 21mm;
- V20 0707 021 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 21mm;
- V20 0707 021 220: 6 unidades de limas tamanhos ISO 08-10 de 21mm;
- V20 0707 021 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 21mm;
- V20 0707 021 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 21mm;
- V20 0707 021 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 21mm;
- V20 0707 021 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 21mm;
- V20 0707 021 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 21mm;
- V20 0707 021 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 21mm;
- V20 0707 021 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 21mm;
- V20 0707 021 045: 6 unidades de limas tamanho ISO 45 de 21mm;
- V20 0707 021 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 21mm;
- V20 0707 021 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 21mm;
- V20 0707 021 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 21mm;
- V20 0707 021 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 21mm;
- V20 0707 021 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 21mm;
- V20 0707 021 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 21mm;
- V20 0707 025 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 25mm;
- V20 0707 025 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 25mm;
- V20 0707 025 220: 6 unidades de limas tamanhos ISO 08-10 de 25mm;
- V20 0707 025 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 25mm;
- V20 0707 025 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 25mm;
- V20 0707 025 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 25mm;
- V20 0707 025 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 25mm;
- V20 0707 025 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 25mm;
- V20 0707 025 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 25mm;
- V20 0707 025 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 25mm;
- V20 0707 025 045: 6 unidades de limas tamanho ISO 45 de 25mm;
- V20 0707 025 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 25mm;
- V20 0707 025 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 25mm;
- V20 0707 025 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 25mm;
- V20 0707 025 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 25mm;
- V20 0707 025 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 25mm;
- V20 0707 025 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 25mm;
- V20 0707 031 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 31mm;
- V20 0707 031 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 31mm;
- V20 0707 031 220: 6 unidades de limas tamanhos ISO 08-10 de 31mm;
- V20 0707 031 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 31mm;
- V20 0707 031 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 31mm;
- V20 0707 031 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 31mm;
- V20 0707 031 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 31mm;
- V20 0707 031 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 31mm;
- V20 0707 031 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 31mm;
- V20 0707 031 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 31mm;
- V20 0707 031 045: 6 unidades de limas tamanho ISO 45 de 31mm;
- V20 0707 031 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 31mm;
- V20 0707 031 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 31mm;
- V20 0707 031 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 31mm;
- V20 0707 031 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 31mm;
- V20 0707 031 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 31mm;
- V20 0707 031 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 31mm.

## VDW GmbH

Bayerwaldstr.15, D-81737 - Munique  
Alemanha

Importado por:

**DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.**

Rua José Francisco de Souza, 1926 - CEP 13633412 - Pirassununga-SP  
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira - [www.dentsply.com.br](http://www.dentsply.com.br)  
SAC: 0800 771 2226 | (11) 3046 2222 (Somente no Brasil)  
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396  
Registro ANVISA nº 80196880347

# Kendo® Hedstroem

Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis

Instruções de Uso

## Composição

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® Hedstroem foram projetadas com uma parte ativa de aço inoxidável DIN 1.4310, um stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.

## Indicações de Uso

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® Hedstroem são indicadas para utilização em tratamentos endodônticos convencionais de canais radiculares. Estes instrumentos devem ser utilizados apenas por dentistas treinados.

## Contraindicações

Não se aplica.

## Advertências

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® Hedstroem são instrumentos exclusivos de uso odontológico e não devem ser utilizadas para outros fins.

## Precauções

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® Hedstroem podem ser reutilizadas (no máximo 8 vezes), devendo-se garantir que apenas procedimentos validados e equipamentos calibrados e submetidos regularmente à manutenção sejam utilizados na limpeza/desinfecção e esterilização das limas, a cada uso. Os procedimentos de limpeza e desinfecção são pré-requisitos essenciais para uma efetiva esterilização.

## Efeitos Adversos

Não se aplica.

## Instruções Passo a Passo

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® Hedstroem são utilizadas no preparo dos canais radiculares nos tratamentos endodônticos. Durante a aplicação, a lima entra em contato apenas com a dentina que permanece no canal após sua utilização.

As Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® Hedstroem são utilizadas para preparar o canal radicular em movimento de limagem / escovação sem rotação com uma alta e eficiente capacidade de corte. Elas fornecem um rápido e eficiente alargamento do canal radicular especialmente para a seção reta do canal.

## Cuidados de Conservação

A Limas de Aço Inoxidável Não Estéreis Kendo® Hedstroem devem ser armazenadas em temperatura entre 0°-30°C, umidade relativa entre 50-60% e ao abrigo de radiação solar.

Lote: Vide Rótulo do Produto

Prazo de Validade: 10 anos.