

### Apresentação

As limas K-Reamer® são fornecidas em blisters plásticos com 6 unidades de limas de aço inoxidável, estéreis.

#### K-Reamer®

- V04 0353 021 006: 6 unidades de limas tamanho ISO 06 de 21mm;
- V04 0353 021 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 21mm;
- V04 0353 021 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 21mm;
- V04 0353 021 210: 6 unidades de limas tamanhos ISO 06-10 de 21mm;
- V04 0353 021 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 21mm;
- V04 0353 021 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 21mm;
- V04 0353 021 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 21mm;
- V04 0353 021 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 21mm;
- V04 0353 021 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 21mm;
- V04 0353 021 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 21mm;
- V04 0353 021 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 21mm;
- V04 0353 021 045: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45 de 21mm;
- V04 0353 021 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 21mm;
- V04 0353 021 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 21mm;
- V04 0353 021 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 21mm;
- V04 0353 021 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 21mm;
- V04 0353 021 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 21mm;
- V04 0353 021 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 21mm;
- V04 0353 021 090: 6 unidades de limas tamanhos ISO 90 de 21mm;
- V04 0353 021 100: 6 unidades de limas tamanhos ISO 100 de 21mm;
- V04 0353 021 110: 6 unidades de limas tamanhos ISO 110 de 21mm;
- V04 0353 021 250: 6 unidades de limas tamanhos ISO 90-110 de 21mm;
- V04 0353 025 006: 6 unidades de limas tamanho ISO 06 de 25mm;
- V04 0353 025 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 25mm;
- V04 0353 025 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 25mm;
- V04 0353 025 210: 6 unidades de limas tamanhos ISO 06-10 de 25mm;
- V04 0353 025 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 25mm;
- V04 0353 025 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 25mm;
- V04 0353 025 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 25mm;
- V04 0353 025 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 25mm;
- V04 0353 025 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 25mm;
- V04 0353 025 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 25mm;
- V04 0353 025 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 25mm;
- V04 0353 025 045: 6 unidades de limas tamanho ISO 45 de 25mm;
- V04 0353 025 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 25mm;
- V04 0353 025 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 25mm;
- V04 0353 025 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 25mm;
- V04 0353 025 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 25mm;
- V04 0353 025 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 25mm;
- V04 0353 025 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 25mm;
- V04 0353 025 090: 6 unidades de limas tamanho ISO 90 de 25mm;
- V04 0353 025 100: 6 unidades de limas tamanho ISO 100 de 25mm;
- V04 0353 025 110: 6 unidades de limas tamanho ISO 110 de 25mm;
- V04 0353 025 120: 6 unidades de limas tamanho ISO 120 de 25mm;
- V04 0353 025 130: 6 unidades de limas tamanho ISO 130 de 25mm;
- V04 0353 025 140: 6 unidades de limas tamanho ISO 140 de 25mm;
- V04 0353 025 260: 6 unidades de limas tamanhos ISO 90-140 de 25mm;
- V04 0353 031 006: 6 unidades de limas tamanho ISO 06 de 31mm;
- V04 0353 031 008: 6 unidades de limas tamanho ISO 08 de 31mm;
- V04 0353 031 010: 6 unidades de limas tamanho ISO 10 de 31mm;
- V04 0353 031 210: 6 unidades de limas tamanhos ISO 06-10 de 31mm;
- V04 0353 031 015: 6 unidades de limas tamanho ISO 15 de 31mm;
- V04 0353 031 020: 6 unidades de limas tamanho ISO 20 de 31mm;
- V04 0353 031 025: 6 unidades de limas tamanho ISO 25 de 31mm;
- V04 0353 031 030: 6 unidades de limas tamanho ISO 30 de 31mm;
- V04 0353 031 035: 6 unidades de limas tamanho ISO 35 de 31mm;

#### VDW GmbH

Bayerwaldstr. 15, D-81737, Munique  
Alemanha

#### Importado por:

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.  
Rua José Francisco de Souza, 1926 - CEP 13633412 - Pirassununga-SP  
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira - www.dentsply.com.br  
SAC: 0800 771 2226 | (11) 3046 2222 (Somente no Brasil)  
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396  
Registros ANVISA nº 80196880340

## K-Reamer®

Limas de Aço Inoxidável Estéreis

## Instruções de Uso

- V04 0353 031 040: 6 unidades de limas tamanho ISO 40 de 31mm;
- V04 0353 031 230: 6 unidades de limas tamanhos ISO 15-40 de 31mm;
- V04 0353 031 045: 6 unidades de limas tamanho ISO 45 de 31mm;
- V04 0353 031 050: 6 unidades de limas tamanho ISO 50 de 31mm;
- V04 0353 031 055: 6 unidades de limas tamanho ISO 55 de 31mm;
- V04 0353 031 060: 6 unidades de limas tamanho ISO 60 de 31mm;
- V04 0353 031 070: 6 unidades de limas tamanho ISO 70 de 31mm;
- V04 0353 031 080: 6 unidades de limas tamanho ISO 80 de 31mm;
- V04 0353 031 240: 6 unidades de limas tamanhos ISO 45-80 de 31mm;
- V04 0353 031 090: 6 unidades de limas tamanho ISO 90 de 31mm;
- V04 0353 031 100: 6 unidades de limas tamanho ISO 100 de 31mm;
- V04 0353 031 110: 6 unidades de limas tamanho ISO 110 de 31mm;
- V04 0353 031 120: 6 unidades de limas tamanho ISO 120 de 31mm;
- V04 0353 031 130: 6 unidades de limas tamanho ISO 130 de 31mm;
- V04 0353 031 140: 6 unidades de limas tamanho ISO 140 de 31mm;
- V04 0353 031 260: 6 unidades de limas tamanhos ISO 90-140 de 31mm.

### Composição

A lima K-Reamer® foi projetada com uma parte ativa de aço inoxidável DIN 1.4310, um stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento

### Indicações de Uso

A lima K-Reamer® é indicada para utilização em tratamentos endodônticos convencionais de canais radiculares. É utilizada para moldar o canal radicular no movimento de mandril (max. 90° no sentido horário) com uma capacidade de corte moderada. Devido ao ângulo de corte de 20°, a profundidade é alcançada rapidamente. Este instrumento deve ser utilizado apenas por dentistas treinados.

### Contraindicações

Não aplicável.

### Advertências

As limas são instrumentos exclusivos de uso odontológico e não devem ser utilizadas para outros fins.

### Precauções

As limas são fornecidas estéreis, mas podem ser reutilizadas (no máximo 8 vezes), devendo-se garantir que apenas procedimentos validados e equipamentos calibrados e submetidos regularmente à manutenção sejam utilizados na limpeza/desinfecção e esterilização das limas, a cada uso. Os procedimentos de limpeza e desinfecção são pré-requisitos essenciais para uma efetiva esterilização.

### Efeitos Adversos

Não se aplica.

### Instruções Passo a Passo

A lima K-Reamer® é utilizada na preparação do canal radicular. A lima deve limpar o canal radicular e colocá-lo em um formato cônico, o que permite um preenchimento estreito do canal radicular. A seção transversal produzida durante a moagem tem a forma de um quadrado ou um triângulo equilátero. Portanto, é possível preparar o canal radicular com o movimento da lâmina rotativa.

### Cuidados de Conservação

A lima K-Reamer® deve ser armazenada em temperatura entre 0°-30°C, umidade relativa entre 50-60% e ao abrigo de radiação solar.

Lote: Vide Rótulo do Produto

Prazo de Validade: 05 anos