

Occlufast + Color/Occlufast +

Família de Silicones de Adição Zhermack
Material de Moldagem Odontológico

Zhermack
Dental

INSTRUÇÕES DE USO

COMPOSIÇÃO

Polivinilsiloxano, Sílica, Alumínio Inorgânico, Metilhidrogensiloxano, Surfactante, Complexo Organoplatínico, Pigmentos e Aromas.

INDICAÇÕES DE USO

Silicones de Adição (Polivinilsiloxanos) Hidrocompatíveis para Moldes de Elevada Precisão.

Occlufast + / Occlufast + Color: Registro de oclusão dentária dos pacientes em ambiente clínico.

CONTRAINDICAÇÕES

Não use em indivíduos com hipersensibilidade conhecida a algum dos componentes.

ADVERTÊNCIAS

- O endurecimento dos polivinilsiloxanos pode ser inibido pelo contato com luvas de látex. Evitar o contato direto da luva de látex. Aconselha-se o uso de luvas de vinil ou nitrilo, ou uma boa lavagem das mãos para eliminar todos os vestígios poluentes, no caso do uso de luvas de látex;
- Os polivinilsiloxanos são quimicamente resistentes; portanto evitar manchar jalecos e roupas;
- Para reduzir o risco de contaminação cruzada, use sempre tampas/envoltórios descartáveis sobre o dispensador e cartuchos de (50ml); remova-os antes de cada uso.
- Em caso de hipersensibilidade, suspenda imediatamente a utilização e tome medidas para garantir que o paciente está seguro.

PRECAUÇÕES

GERAIS


- O endurecimento dos polivinilsiloxanos pode ser inibido pelo contato com luvas de látex. Evitar o contato direto da luva de látex. Aconselha-se o uso de luvas de vinil ou nitrilo, ou uma boa lavagem das mãos para eliminar todos os vestígios poluentes, no caso do uso de luvas de látex.
- Os polivinilsiloxanos são quimicamente resistentes; portanto evitar manchar jalecos e roupas.
- Para reduzir o risco de contaminação cruzada, use sempre tampas/envoltórios descartáveis sobre o dispensador e cartuchos de (50ml); remova-os antes de cada uso.
- Não elimine o produto no ambiente.

OCCLUFAST + & OCCLUFAST + COLOR

- Não contamine o material ou os dentes/superfícies a registrar com soluções de deslocação gengival à base de sulfeto, poliéteres ou camadas da superfície não polimerizadas de resinas acrílicas ou bis-acrílicas. Os resíduos destes materiais podem interferir com a fixação do produto. Se as superfícies ficarem contaminadas, limpe-as com muita água, álcool etílico ou outros solventes adequados e específicos para resinas acrílicas ou bis-acrílicas.
- Utilize o produto a uma temperatura ambiente de 23 °C (as temperaturas mais altas reduzem o tempo de trabalho, as temperaturas mais baixas aumentam o tempo de trabalho). O paciente pode perceber-se de uma reação exotérmica durante a utilização do material.

EFEITOS ADVERSOS

- Polivinilsiloxanos podem provocar irritações ou outras reações alérgicas.

 **Zhermack S.p.A.**
Via Bovazecchino, 100 | 45021
Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
info@zhermack.com | www.zhermack.com

2100-BRLAB-0009 [2]

Importado por:
Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda.
R. Senador Carlos Gomes de Oliveira, Nº 863, CD 02, Unidade 63 - Distrito Industrial
CEP: 88.104-785 - SÃO JOSÉ/SC CNPJ 12.483.930/0001-22;
www.dentsplysirona.com.br - SAC: 0800 771 2226 / (11) 3046-2222 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: João Gilberto Da Silva Zanuzzo - CRF/SC: Nº 8326
ANVISA Nº 80745400037

Occlufast + Color/Occlufast +

Família de Silicones de Adição Zhermack
Material de Moldagem Odontológico

Zhermack 
Dental

INSTRUÇÕES DE USO

- Irritação, vermelhidão ou sinais de hipersensibilidade poderão ocorrer em caso de alergia a qualquer um dos componentes.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO

Operações preliminares:


- Leia as instruções antes da utilização.
- Use luvas de proteção e roupa de trabalho adequadas.

Monte o dispositivo de acordo com as instruções seguintes:

- Montar e utilizar o dispositivo dispensador conforme instruções do fabricante.
- Insira o cartucho certificando-se de que encaixa na direção certa. O cartucho tem de ser inserido com o "V" na base virado para baixo (fig.1).
- Com o cartucho em posição no dispensador, remova a tampa rodando-a 1/4 de volta. Remova a tampa num movimento limpo e elimine-a (fig. 2).
- Certifique-se de que os dois componentes saem em conjunto quando pressiona suavemente a alavanca do dispensador. Extruda uma pequena quantidade de produto para equalizar o fluxo dos dois componentes. Limpe o bocal do cartucho, removendo o produto em excesso dos orifícios de extrusão (fig. 3).
- Insira a ponta de mistura num movimento limpo para que o entalhe em V no anel colorido esteja alinhado com o alojamento no cartucho. Rode a ponta 1/4 de volta, exercendo apenas pressão no anel colorido e não apenas na ponta de mistura (fig. 4-5).
- É aconselhável envolver o dispensador e o cartucho em celofane antes da utilização, removendo posteriormente o celofane.

Utilizar o dispositivo no paciente:

- Proteja os recortes antes de utilizar o produto.
- Aplique o produto utilizando a técnica pretendida (oclusal ou vestibular). Se utilizar a técnica oclusal, primeiro aplique o material nos dentes, depois, peça ao paciente para morder. Para registos de oclusão efetuados utilizando a técnica vestibular, injete o produto sobre os dentes com as arcadas na posição que pretende registar. Ao aplicar material cromático, vai observar uma alteração na cor que orienta a aplicação/remoção do material. Occlufast+ Color começa verde durante a aplicação e fica gradualmente amarelo à medida que fixa na cavidade oral. Uma vez fixo, a mudança uniforme da cor indica que pode remover o registo da cavidade oral. À temperatura ambiente, o registo de oclusão obtido vai regressar à cor inicial. Esta mudança não altera, de modo algum, as características do material.
- Deixe a ponta no cartucho.

 **Zhermack S.p.A.**
Via Bovazecchino, 100 | 45021
Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
info@zhermack.com | www.zhermack.com

2100-BRLAB-0009 [2]

Importado por:


Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda.
R. Senador Carlos Gomes de Oliveira, Nº 863, CD 02, Unidade 63 - Distrito Industrial
CEP: 88.104-785 - SÃO JOSÉ/SC CNPJ 12.483.930/0001-22;
www.dentsplysirona.com.br - SAC: 0800 771 2226 / (11) 3046-2222 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: João Gilberto Da Silva Zanuzzo - CRF/SC: Nº 8326
ANVISA Nº 80745400037

Occlufast + Color/Occlufast +

Família de Silicones de Adição Zhermack
Material de Moldagem Odontológico

Zhermack
Dental

INSTRUÇÕES DE USO

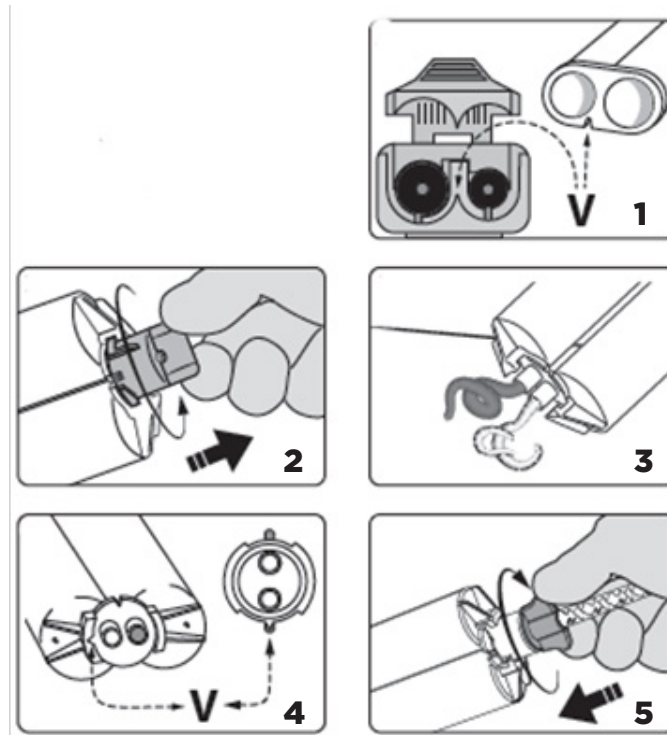

Dados Técnicos

	Occlufast +	Occlufast + Color
Tempo de Trabalho*	30"	30"
Tempo de boca*	1'00"	1'00"
Dureza	37±5 Shore D	37±5 Shore D
Reprodução de Permenores	20 µm	20 µm
Variação dimensional linear (aprox.)	0,20%	0,20%

(*) Os tempos especificados são referentes a um teste interno realizado a uma temperatura de 35° C.

Características - Occlufast + ; Occlufast + Color:

- Occlufast+ tem uma dureza de 37±5 Sh D.
- Occlufast+ Color tem uma dureza de 37±5 Sh D e é termocromático.
- O material dimensionalmente estável permite o registro intraoral das posições relativas das arcadas.

Zhermack S.p.A.
Via Bovazecchino, 100 | 45021
Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
info@zhermack.com | www.zhermack.com

2100-BRLAB-0009 [2]

Importado por:
Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda.
R. Senador Carlos Gomes de Oliveira, Nº 863, CD 02, Unidade 63 - Distrito Industrial
CEP: 88.104-785 - SÃO JOSÉ/SC CNPJ 12.483.930/0001-22;
www.dentsplysirona.com.br - SAC: 0800 771 2226 / (11) 3046-2222 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: João Gilberto Da Silva Zanuzzo - CRF/SC: Nº 8326
ANVISA Nº 80745400037

Occlufast + Color/Occlufast +

Família de Silicones de Adição Zhermack
Material de Moldagem Odontológico

Zhermack
Dental

INSTRUÇÕES DE USO

LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E DESCARTE

Lavagem e desinfecção registros: Depois de ter sido abundantemente lavado sob água corrente, o molde pode ser imediatamente desinfetado. A desinfecção usando um desinfetante específico para silicones de adição (polivinilsiloxanos), mergulhando a impressão na solução ou pulverizando-a diretamente se estiver usando um desinfetante em spray. Siga as instruções do fabricante do desinfetante escolhido para o tempo de contato. Desinfetantes à base de sal de amônio quaternário ou misturas de álcool e redutores de tensão superficial foram testados.

Limpeza e desinfecção do dispensador: Proceder conforme instruções do fabricante do dispositivo.

Limpeza e desinfecção das Pontas Misturadoras - Desinfete completamente a ponta sem removê-la do cartucho. Antes do próximo uso do cartucho, remova a Ponta Misturadora antiga e encaixe uma nova. Recomenda-se limpar e desinfetar a ponta usando uma solução aquosa à base de álcool etílico, álcool isopropílico (ou uma mistura deles). Siga as instruções do fabricante do desinfetante escolhido para o tempo de contato.

Descarte: O produto (material, material polimerizado e os registros) e a embalagem devem ser descartados em conformidade com as normas locais aplicáveis.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Os materiais de moldagem são garantidos por um período de 36 meses a partir da data de fabricação, se conservados corretamente entre 5° e 27°C. Transportar à temperatura de -15°C a +40°C e 75% UR por um período máximo de 30 dias.

Nota:

- Não armazene o produto sob luz solar direta.
- O registro de oclusão pode ser enviado para o laboratório como uma impressão normal, sem precauções especiais, desde que seja protegido contra esforços mecânicos.

Lote: Vide Rótulo do Produto

Validade: 36 meses.

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão dessas Instruções de uso com o produto adquirido indicado na embalagem.


SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA

NÃO UTILIZE O PRODUTO APÓS O PRAZO DE VALIDADE ESPECIFICADO NA EMBALAGEM.

PONTAS MISTURADORAS - USO ÚNICO

 **Zhermack S.p.A.**
Via Bovazecchino, 100 | 45021
Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
info@zhermack.com | www.zhermack.com

2100-BRLAB-0009 [2]

Importado por:

Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda.
R. Senador Carlos Gomes de Oliveira, Nº 863, CD 02, Unidade 63 - Distrito Industrial
CEP: 88.104-785 - SÃO JOSÉ/SC CNPJ 12.483.930/0001-22;
www.dentsplysirona.com.br - SAC: 0800 771 2226 / (11) 3046-2222 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: João Gilberto Da Silva Zanuzzo - CRF/SC: Nº 8326
ANVISA Nº 80745400037

Occlufast + Color/Occlufast +

Família de Silicones de Adição Zhermack
Material de Moldagem Odontológico


Zhermack 
Dental

INSTRUÇÕES DE USO

O produto não foi testado quanto a compatibilidade com acessórios que não aqueles fornecidos. A utilização de acessórios não originais poderá causar eventos que resultam numa redução na exatidão do registo de oclusão. A utilização de acessórios não originais não é, por isso, recomendada.

Observações importantes: Quaisquer informações fornecidas, mesmo durante demonstrações, não invalidam as instruções de utilização. Os usuários devem verificar se o produto é adequado para a aplicação prevista. O fabricante não será responsável por danos, incluindo em terceiros, resultantes do descumprimento das instruções ou da inadequação na aplicação. A responsabilidade do fabricante está limitada ao valor dos produtos fornecidos.

Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao nosso SAC através do 0800 771 2226 (Somente no Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com

 **Zhermack S.p.A.**
Via Bovazecchino, 100 | 45021
Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
info@zhermack.com | www.zhermack.com

2100-BRLAB-0009 [2]























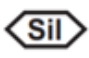




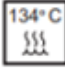


Importado por:
Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda.
R. Senador Carlos Gomes de Oliveira, Nº 863, CD 02, Unidade 63 - Distrito Industrial
CEP: 88.104-785 - SÃO JOSÉ/SC CNPJ 12.483.930/0001-22;
www.dentsplysirona.com.br - SAC: 0800 771 2226 / (11) 3046-2222 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: João Gilberto Da Silva Zanuzzo - CRF/SC: Nº 8326
ANVISA Nº 80745400037


Occlufast + Color/Occlufast +

Família de Silicones de Adição Zhermack
Material de Moldagem Odontológico

Zhermack
Dental

INSTRUÇÕES DE USO

Símbolo	PT	Símbolo	PT	Símbolo	PT
	Número de referência		Número de lote		Número de série
	Fabricante		Consultar as Instruções de uso para utilização		Marcação CE
	Data de fabricação		Data de validade (até a qual o produto pode ser utilizado)		Uso único Não reutilizar
	Unidades por embalagem		Embalagem com conteúdo sortido		
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		Não restituível se o lacre estiver rompido		Não re-esterilizar Reprocessamento proibido
	Produto estéril		Produto não estéril		Esterilizável em esterilizador à vapor (autoclave), na temperatura especificada
	Produto esterilizado por irradiação		Produto esterilizado por vapor ou calor seco		
	Rotação no sentido anti-horário		Rotação no sentido horário		
	Níquel Titânio		Silicone		Gutta-Percha
	Manter protegido da luz solar		Manter protegido de fontes de calor e radioatividade		Manter seco
	Limite de temperatura		Limite de umidade		Limite de pressão atmosférica

 **Zhermack S.p.A.**
Via Bovazecchino, 100 | 45021
Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
info@zhermack.com | www.zhermack.com

2100-BRLAB-0009 [2]

Importado por:
Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda.
R. Senador Carlos Gomes de Oliveira, Nº 863, CD 02, Unidade 63 - Distrito Industrial
CEP: 88.104-785 - SÃO JOSÉ/SC CNPJ 12.483.930/0001-22;
www.dentsplysirona.com.br - SAC: 0800 771 2226 / (11) 3046-2222 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: João Gilberto Da Silva Zanuzzo - CRF/SC: Nº 8326
ANVISA Nº 80745400037