

# Occlufast Rock

Família de Silicones de Adição Zhermack  
Material de Moldagem Odontológico

**Zhermack**  
Dental

## INSTRUÇÕES DE USO

### COMPOSIÇÃO

Polivinilsiloxano, Sílica, Alumínio Inorgânico, Metilhidrogensiloxano, Complexo Organoplatínico e Pigmentos.

### INDICAÇÕES DE USO

Silicones de Adição (Polivinilsiloxanos) Hidrocompatíveis para Moldes de Elevada Precisão.

Occlufast Rock: Registro de oclusão dentária dos pacientes em ambiente clínico, com todas as técnicas. Chave de oclusão para registro da relação intermaxilar em cêntrica, em protrusão ou em lateralidade. Chave de oclusão para registro para avaliações oclusais. Registro para avaliações diagnósticas dos distúrbios crânio-mandibulares. Registros oclusais ortodônticos.

### CONTRAINDICAÇÕES

Não use em indivíduos com hipersensibilidade conhecida a algum dos componentes.

### ADVERTÊNCIAS

- O endurecimento dos polivinilsiloxanos pode ser inibido pelo contato com luvas de látex. Evitar o contato direto da luva de látex. Aconselha-se o uso de luvas de vinil ou nitrilo, ou uma boa lavagem das mãos para eliminar todos os vestígios poluentes, no caso do uso de luvas de látex.
- Os polivinilsiloxanos são quimicamente resistentes; portanto evitar manchar jalecos e roupas.
- Para reduzir o risco de contaminação cruzada, use sempre tampas/envoltórios descartáveis sobre o dispensador e cartuchos de (50ml); remova-os antes de cada uso.

### PRECAUÇÕES

- O endurecimento dos polivinilsiloxanos pode ser inibido pelo contato com luvas de látex. Evitar o contato direto da luva de látex. Aconselha-se o uso de luvas de vinil ou nitrilo, ou uma boa lavagem das mãos para eliminar todos os vestígios poluentes, no caso do uso de luvas de látex.
- Os polivinilsiloxanos são quimicamente resistentes; portanto evitar manchar jalecos e roupas.
- Para reduzir o risco de contaminação cruzada, use sempre tampas/envoltórios descartáveis sobre o dispensador e cartuchos de (50ml); remova-os antes de cada uso.

### EFEITOS ADVERSOS

- Polivinilsiloxanos podem provocar irritações ou outras reações alérgicas.
- Irritação, vermelhidão ou sinais de hipersensibilidade podem ocorrer em caso de alergia a qualquer um dos componentes.

### INSTRUÇÃO PASSO A PASSO

#### PASSO-A-PASSO PARA O USO DISPENSADOR

Montar e utilizar o dispositivo dispensador conforme instruções do fabricante.

- Insira o cartucho certificando-se de que encaixa na direção certa. O cartucho tem de ser inserido com o "V" na base virado para baixo (fig.1).
- Com o cartucho em posição no dispensador, remova a tampa rodando-a 1/4 de volta. Remova a tampa num movimento limpo e elimine-a (fig.2).



**Zhermack S.p.A.**

Via Bovazecchino, 100 | 45021

Badia Polesine (RO) Italy

T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596

info@zhermack.com | www.zhermack.com

#### Importado por:

Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda.

R. Senador Carlos Gomes de Oliveira, Nº 863, CD 02, Unidade 63 - Distrito Industrial

CEP: 88.104-785 - SÃO JOSÉ/SC CNPJ 12.483.930/0001-22;

www.dentsplysirona.com.br - SAC: 0800 771 2226 / (11) 3046-2222 (Somente no Brasil)

**Responsável Técnico:** João Gilberto Da Silva Zanuzzo - CRF/SC: Nº 8326

**ANVISA Nº** 80745400037


# Occlufast Rock

Família de Silicones de Adição Zhermack  
Material de Moldagem Odontológico

**Zhermack**  
Dental


## INSTRUÇÕES DE USO

- Antes da montagem da ponta misturadora, assegurar-se que os dois componentes (base e catalisador) estejam saindo uniformemente exercendo uma ligeira pressão no gatilho e fazendo sair uma pequena quantidade da pasta. Limpar, eliminando o material (pasta) do orifício de saída (fig.3).
- Introduzir com força, a ponta misturadora, fazendo coincidir a marca em “V” no aro colorido, correspondente à base do cartucho. Girar (1/4 de volta) fazendo somente pressão no aro colorido e não na ponta misturadora. Se necessário, inserir a ponta intra oral (fig.4A-4B).

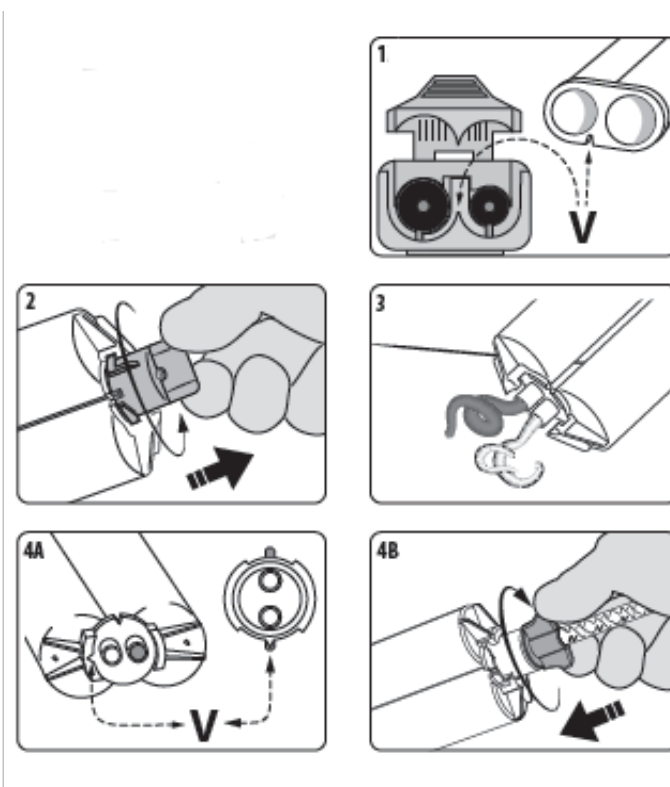

- Aplicar Occlufast Rock de acordo com a técnica desejada (oclusal ou vestibular). No caso de técnica oclusal, após ter aplicado o material diretamente sobre os dentes, o operador deverá solicitar ao paciente para fechar a boca. Occlufast Rock é tixotrópico e, portanto, não escorre, o que facilita o controle da aplicação.

### Tempos de utilização clínica

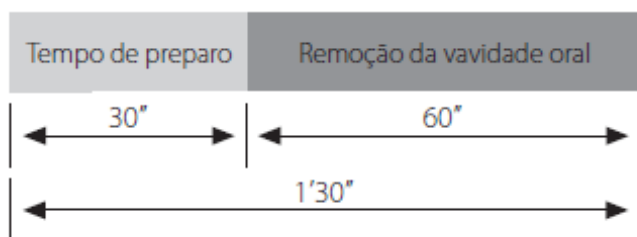

**Zhermack S.p.A.**  
Via Bovazecchino, 100 | 45021  
Badia Polesine (RO) Italy  
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596  
info@zhermack.com | www.zhermack.com

**Importado por:**  
Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda.  
R. Senador Carlos Gomes de Oliveira, Nº 863, CD 02, Unidade 63 - Distrito Industrial  
CEP: 88.104-785 - SÃO JOSÉ/SC CNPJ 12.483.930/0001-22;  
www.dentsplysirona.com.br - SAC: 0800 771 2226 / (11) 3046-2222 (Somente no Brasil)  
**Responsável Técnico:** João Gilberto Da Silva Zanuzzo - CRF/SC: Nº 8326  
**ANVISA Nº** 80745400037

# Occlufast Rock

Família de Silicones de Adição Zhermack  
Material de Moldagem Odontológico

**Zhermack**  
Dental

## INSTRUÇÕES DE USO

### Dados Técnicos

Cor	Lila
Relação de mistura base catalisador	1:1
Tempo de preparo*	30"
Permanência na cavidade oral	60"
Reprodução dos detalhes	20 µm
Variação dimensional linear após 24h	- 0,05%
Dureza	95 Shore A

\*Os tempos mencionados são entendidos do início da mistura a 23° C.  
Temperaturas mais elevadas reduzem os tempos, temperaturas mais baixas os aumentam.

### Características

- Tixotrópico, não escoar.
- Muito duro após o endurecimento (95 Shore A).
- De extrema precisão Imperceptível para o paciente que fecha a boca de modo natural.
- Dimensionalmente estável no tempo e durante a desinfecção.
- Rápido, tempo de permanência na cavidade oral menor de 60 segundos.
- Pode ser reposicionado para verificação após o endurecimento.
- Fácil de dar acabamento. Após o endurecimento, pode ser acabado com uma lâmina cortante ou uma fresa.


## LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E DESCARTE

Lavagem e desinfecção registros: Depois de ter sido abundantemente lavado sob água corrente, o molde pode ser imediatamente desinfetado. A desinfecção usando um desinfetante específico para silicones de adição (polivinilsiloxanos), mergulhando a impressão na solução ou pulverizando-a diretamente se estiver usando um desinfetante em spray. Siga as instruções do fabricante do desinfetante escolhido para o tempo de contato. Desinfetantes à base de sal de amônio quaternário ou misturas de álcool e redutores de tensão superficial foram testados.

Limpeza e desinfecção do dispensador: Proceder conforme instruções do fabricante do dispositivo.

Limpeza e desinfecção das Pontas Misturadoras - Desinfete completamente a ponta sem removê-la do cartucho. Antes do próximo uso do cartucho, remova a Ponta Misturadora antiga e encaixe uma nova. Recomenda-se limpar e desinfetar a ponta usando uma solução aquosa à base de álcool etílico, álcool isopropílico (ou uma mistura deles). Siga as instruções do fabricante desinfetante escolhido para o tempo de contato.

Descarte: O produto (material, material polimerizado e os registros) e a embalagem devem ser descartados em conformidade com as normas locais aplicáveis.

 **Zhermack S.p.A.**  
Via Bovazecchino, 100 | 45021  
Badia Polesine (RO) Italy  
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596  
info@zhermack.com | www.zhermack.com

2100-BRLAB-0011 [2]

**Importado por:**  
Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda.  
R. Senador Carlos Gomes de Oliveira, Nº 863, CD 02, Unidade 63 - Distrito Industrial  
CEP: 88.104-785 - SÃO JOSÉ/SC CNPJ 12.483.930/0001-22;  
www.dentsplysirona.com.br - SAC: 0800 771 2226 / (11) 3046-2222 (Somente no Brasil)  
**Responsável Técnico:** João Gilberto Da Silva Zanuzzo - CRF/SC: Nº 8326  
**ANVISA Nº** 80745400037

# Occlufast Rock

Família de Silicones de Adição Zhermack  
Material de Moldagem Odontológico

## INSTRUÇÕES DE USO

**Zhermack**   
Dental

### CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Os materiais de moldagem são garantidos por um período de 36 meses a partir da data de fabricação, se conservados corretamente entre 5° e 27°C. Transportar à temperatura de -15°C a +40°C e 75% UR por um período máximo de 30 dias.

**Nota:** O registro pode ser enviado ao laboratório como uma normal impressão, sem precauções especiais, contanto que esteja protegido contra solicitações mecânicas. Conservar à temperatura ambiente.

Lote: Vide Rótulo do Produto

Validade: 36 meses.

**ATENÇÃO:** Verifique a correlação da versão dessas Instruções de uso com o produto adquirido indicado na embalagem.

SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA

NÃO UTILIZE O PRODUTO APÓS O PRAZO DE VALIDADE ESPECIFICADO NA EMBALAGEM.

PONTAS MISTURADORAS - USO ÚNICO

O produto não foi testado quanto a compatibilidade com acessórios que não aqueles fornecidos. A utilização de acessórios não originais poderá causar eventos que resultam numa redução na exatidão do registo de oclusão. A utilização de acessórios não originais não é, por isso, recomendada.

**Observações importantes:** Quaisquer informações fornecidas, mesmo durante demonstrações, não invalidam as instruções de utilização. Os usuários devem verificar se o produto é adequado para a aplicação prevista. O fabricante não será responsável por danos, incluindo em terceiros, resultantes do descumprimento das instruções ou da inadequação na aplicação. A responsabilidade do fabricante está limitada ao valor dos produtos fornecidos.

Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao nosso SAC através do 0800 771 2226 (Somente no Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com



**Zhermack S.p.A.**

Via Bovazecchino, 100 | 45021

Badia Polesine (RO) Italy

T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596

info@zhermack.com | www.zhermack.com

**Importado por:**

Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda.

R. Senador Carlos Gomes de Oliveira, Nº 863, CD 02, Unidade 63 - Distrito Industrial

CEP: 88.104-785 - SÃO JOSÉ/SC CNPJ 12.483.930/0001-22;

www.dentsplysirona.com.br - SAC: 0800 771 2226 / (11) 3046-2222 (Somente no Brasil)

**Responsável Técnico:** João Gilberto Da Silva Zanuzzo - CRF/SC: Nº 8326























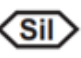




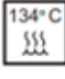


**ANVISA Nº** 80745400037

# Occlufast Rock

Família de Silicones de Adição Zhermack  
Material de Moldagem Odontológico

**Zhermack**  
Dental

## INSTRUÇÕES DE USO

Símbolo	PT	Símbolo	PT	Símbolo	PT
	Número de referência		Número de lote		Número de série
	Fabricante		Consultar as Instruções de uso para utilização		Marcação CE
	Data de fabricação		Data de validade (até a qual o produto pode ser utilizado)		Uso único Não reutilizar
	Unidades por embalagem		Embalagem com conteúdo sortido		
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		Não restituível se o lacre estiver rompido		Não re-esterilizar Reprocessamento proibido
	Produto estéril		Produto não estéril		Esterilizável em esterilizador à vapor (autoclave), na temperatura especificada
	Produto esterilizado por irradiação		Produto esterilizado por vapor ou calor seco		
	Rotação no sentido anti-horário		Rotação no sentido horário		
	Níquel Titânio		Silicone		Gutta-Percha
	Manter protegido da luz solar		Manter protegido de fontes de calor e radioatividade		Manter seco
	Limite de temperatura		Limite de umidade		Limite de pressão atmosférica

 **Zhermack S.p.A.**  
Via Bovazecchino, 100 | 45021  
Badia Polesine (RO) Italy  
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596  
info@zhermack.com | www.zhermack.com

**Importado por:**  
Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda.  
R. Senador Carlos Gomes de Oliveira, Nº 863, CD 02, Unidade 63 - Distrito Industrial  
CEP: 88.104-785 - SÃO JOSÉ/SC CNPJ 12.483.930/0001-22;  
www.dentsplysirona.com.br - SAC: 0800 771 2226 / (11) 3046-2222 (Somente no Brasil)  
**Responsável Técnico:** João Gilberto Da Silva Zanuzzo - CRF/SC: Nº 8326  
**ANVISA Nº** 80745400037