

Pasta Profilática Odahcam

Pasta para Profilaxia e Polimento Dental

Instruções de Uso

Descrição

A Pasta Profilática Odahcam é indicada para uso em procedimentos de profilaxia e polimento, como parte do tratamento profissional de prevenção da cárie e doença periodontal.

Apresentação

15730180000 - Embalagem contendo 50g de pasta no sabor tutti-frutti

Composição

Pedra Pomes; Carbonato de Cálcio; Glicerina; Água; Sorbitol; Corante; Aromatizantes; Espessantes; Edulcorantes e Preservativos.

Precauções/Advertências

- 1 -Manter sempre a bisnaga hermeticamente fechada a fim de evitar alteração na consistência da pasta.
- 2 -Evitar a ingestão da pasta, o que pode ocasionar náuseas. Em caso de ingestão excessiva, administrar grande quantidade de água.

Modo de Usar

Remover da bisnaga e colocar em um pote dappen limpo a quantidade necessária de pasta para uma profilaxia. Fechar imediatamente a bisnaga após a remoção do material, afim de evitar a alteração na consistência do produto. Com um motor de baixa rotação, dirigir a taça de borracha (ou escova de Robinson) contra a superfície da pasta até preenchê-la. Iniciar a profilaxia por vestibular e lingual, evitando pressão excessiva e mantendo a taça de borracha em ângulo de 90º com relação à superfície do dente.

Para oclusal, recomenda-se o uso de escova de Robinson para sulcos profundos, tomando cuidado para não ferir as margens gengivais. Nos locais de difícil acesso, como nas faces proximais, recomenda-se o uso de fio ou fita dental impregnados com pequenas quantidades de pasta.

NOTA: Durante a limpeza e o polimento, a taça (ou escova) deve conter sempre a pasta, para evitar aquecimento excessivo do dente. O controle da salivagem deve ser feito para evitar a diluição da pasta e sua deglutição.

Armazenamento e Transporte

Conservar ao abrigo de calor e umidade.

Nº do Lote: Vide Rótulo.

Prazo de Validade: 36 meses

Uso Único. Uso Profissional.

Proibido Reprocessar

ATENÇÃO:

Verifique a correlação da versão destas instruções de uso com o produto adquirido indicado na embalagem.

Para obter gratuitamente estas instruções de uso em formato impresso, solicite nosso atendimento pelo telefone 0800 771 2226 (somente Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com.

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.

Rua José Francisco de Souza, 1926 - Distrito Industrial,
Pirassununga - SP - Cep: 13633-412 - CNPJ: 31.116.239/0001-55

www.dentsplysirona.com.br

SAC: 0800 771 2226 | (11) 3046 2222 (Somente no Brasil)

ANVISA: 10186370142

Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396

Indústria Brasileira