

Gutta-Percha Points

*EXCLUSIVAMENTE PARA USO DENTÁRIO
APENAS PARA USO PROFISSIONAL
USO ÚNICO
NÃO ESTÉRIL – A SER DESINFECTADO ANTES DO USO*

INSTRUÇÕES DE USO

PROTAPER® UNIVERSAL (REF. A022X), MTWO® (REF. V040220), RECIPROC® (REF. V040214), ALPHA (REF. V040521), NORMALIZADA PELA ISO (REF. A022C, A022E, A022G, A022M, A022N), AUXILIAR (REF. A022F, A022L), CONVENCIONAL (REF. V010542, V020542, V030542), PROTAPER GOLD®, PROTAPER NEXT®, TRUNATOMY®, WAVEONE® GOLD E PROTAPER ULTIMATE® CONFORM FIT® (REF. B00PGG, B00PNG, B00TNG, B00WGG, PULG), RECIPROC® BLUE (REF. V040258), VDW.ROTATE® (REF. M00VRGP) PONTAS DE GUTA-PERCHA

1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Descrição do Produto:
As Pontas de Guta-Percha são dispositivos de obturação endodôntica compostos por borracha de gutta-percha sintética radiopaca usada para preencher o canal radicular após a limpeza e modelagem. Estes dispositivos são de uso único e estão disponíveis apenas na versão não esterilizada.
- Benefícios clínicos:
O benefício clínico para o paciente, ao realizar um procedimento de obturação com Pontas de Guta Percha, é restaurar a integridade do dente e a função mastigatória como parte do tratamento endodôntico.

2 INDICAÇÕES DE USO

- Indicação de uso:
Os produtos são indicados para tratamento de doença endodôntica.
- Finalidade prevista:
Destinados a preencher o espaço moldado, limpo e irrigado do canal radicular.
- População de pacientes prevista:
Pacientes que necessitam de tratamento de canal radicular.
- Utilizador pretendido e ambiente de utilização:
Os dispositivos endodônticos devem ser utilizados apenas em ambiente clínico ou hospitalar, seguindo as boas práticas dentárias, por profissionais dentários qualificados, tais como médicos dentistas, especialistas em endodontia (endodontistas) e assistentes dentários.

3 CONTRAINDICAÇÕES

Nenhuma conhecida.

4 FORMA DE FORNECIMENTO

Código	Produto	Tamanho da ponta (formato ISO) Afunilado	Embalagem e conteúdo
A022X	Pontas de Guta-Percha ProTaper® Universal	F1, F2, F3	Caixa de plástico de 60
A022X00090100	Pontas de Guta-Percha ProTaper® Universal Conjunto F1, F2 e F3	F1, F2, F3	Embalagem de plástico de 60: 20 pontas x tamanho
A022X00090200	Pontas de Guta-Percha ProTaper® Universal Conjunto F4 e F5	F4, F5	Embalagem de plástico de 60: 30 pontas x tamanho
A022C	Pontas de Obturação .02 de Guta-Percha ISO Cor-de-Rosa	010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 070, 080, 100, 110, 120, 130 ou 140 Conicidade 2%	Embalagem de plástico de 120 em frascos (tamanhos 010 a 080): 6 frascos x 20 pontas Embalagem de plástico de 60 em frascos (tamanhos 100 a 140): 6 frascos x 10 pontas
A022C00090000	Pontas de Obturação .02 de Guta-Percha ISO Cor-de-Rosa Conjunto 015-040	015, 020, 025, 030, 035 e 040 Conicidade 2%	Embalagem de plástico de 120 em frascos: 1 frasco x 20 pontas x tamanho
A022C00090100	Pontas de Obturação .02 de Guta-Percha ISO Cor-de-Rosa Conjunto 045-080	045, 050, 055, 060, 070 e 080 Conicidade 2%	Embalagem de plástico de 120 em frascos: 1 frasco x 20 pontas x tamanho
A022C00090200	Pontas de Obturação .02 de Guta-Percha ISO Cor-de-Rosa Conjunto 090-140	090, 100, 110, 120, 130 e 140 Conicidade 2%	Embalagem de plástico de 60 em frascos: 1 frasco x 10 pontas x tamanho
A022E	Pontas de Obturação .02 de Guta-Percha ISO Branco	015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 070 ou 080 Conicidade 2%	Embalagem de plástico de 120 em frascos: 6 frascos x 20 pontas
A022E00190000	Pontas de Obturação .02 de Guta-Percha ISO Cor-de-Rosa Conjunto 015-040	015, 020, 025, 030, 035 e 040 Conicidade 2%	Embalagem de plástico de 120 em frascos: 1 frasco x 20 pontas x tamanho
A022E00190100	Pontas de Obturação .02 de Guta-Percha ISO Cor-de-Rosa Conjunto 045-080	045, 050, 055, 060, 070 e 080 Conicidade 2%	Embalagem de plástico de 120 em frascos: 1 frasco x 20 pontas x tamanho
A022E00190200	Pontas de Obturação .02 de Guta-Percha ISO Cor-de-Rosa Conjunto 090-140	090, 100, 110, 120, 130 e 140 Conicidade 2%	Embalagem de plástico de 60 em frascos: 1 frasco x 10 pontas x tamanho
A022F	Pontas de Obturação Auxiliares de Guta-percha	A, B, C, D	Caixa de plástico de 120
A022F00090000	Pontas de Obturação Auxiliares de Guta-percha Tamanho do conjunto A, B, C e D	A, B, C, D	Embalagem de plástico de 120 em compartimentos: 30 pontas x tamanho
A022G	Pontas de Obturação .02 de Guta-Percha ISO Codificado por Cores	010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 070 ou 080 Conicidade 2%	Embalagem de plástico de 120 em frascos (tamanhos 010 a 080): 6 frascos x 20 pontas Embalagem de plástico de 60 em frascos (tamanhos 090 a 100): 6 frascos x 10 pontas

Código	Produto	Tamanho da ponta (formato ISO) Afunilado	Embalagem e conteúdo
A022G00090000	Pontas de Obturação .02 de Guta-Percha ISO Codificado por Cores Tamanho do conjunto 015-040	015, 020, 025, 030, 035 e 040 Conicidade 2%	Embalagem de plástico de 120 em frascos: 1 frasco x 20 pontas x tamanho
A022G00090100	Pontas de Obturação .02 de Guta-Percha ISO Codificado por Cores Tamanho do conjunto 045-080	045, 050, 055, 060, 070 e 080 Conicidade 2%	Embalagem de plástico de 120 em frascos: 1 frasco x 20 pontas x tamanho
A022G00090200	Pontas de Obturação .02 de Guta-Percha ISO Codificado por Cores Tamanho do conjunto 090-140	090, 100, 110, 120, 130 e 140 Conicidade 2%	Embalagem de plástico de 60 em frascos: 1 frasco x 10 pontas x tamanho
A022L	Pontas de Obturação Auxiliares de Guta-percha	XF, F, M, L	Embalagem de plástico de 120 pontas (XF, F e M) Embalagem de plástico de 60 pontas (L)
A022L00090000	Pontas de Obturação Auxiliares de Guta-percha Tamanho do conjunto XF, F, M e L	XF, F, M, L	Embalagem de plástico de 105: 30 pontas x tamanho (XF, F e M) 15 pontas x tamanho L
A022M	Pontas de Obturação .04 de Guta-Percha ISO Codificado por Cores	015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 060 ou 090 Conicidade 4%	Embalagem de plástico de 120 pontas (tamanhos 015 a 060): 6 frascos x 20 pontas Embalagem de plástico de 60 pontas (tamanho 090): 6 frascos x 10 pontas
A022M00090000	Pontas de Obturação .04 de Guta-Percha ISO Codificado por Cores Tamanho do conjunto 015-040	015, 020, 025, 030, 035 e 040 Conicidade 4%	Embalagem de plástico de 120 em frascos: 1 frasco x 20 pontas x tamanho
A022M00090100	Pontas de Obturação .04 de Guta-Percha ISO Codificado por Cores Tamanho do conjunto 045-090	045, 060 e 090 Conicidade 4%	Embalagem de plástico de 100 em frascos: 2 frascos x 20 pontas x tamanho (045 e 060) 2 frascos x 10 pontas x tamanho 090
A022N	Pontas de Obturação .06 de Guta-Percha ISO Codificado por Cores	015, 020, 025, 030, 035 ou 040 Conicidade 6%	Embalagem de plástico de 120 pontas: 6 frascos x 20 pontas
A022N00090000	Pontas de Obturação .06 de Guta-Percha ISO Codificado por Cores Tamanho do conjunto 015-040	015, 020, 025, 030, 035 e 040 Conicidade 6%	Embalagem de plástico de 120 em frascos: 1 frasco x 20 pontas x tamanho
B00PGGPF	Pontas de Obturação de Guta-Percha ProTaper Gold® Conform Fit®	F1, F2, F3 Cone variável	Caixa de plástico de 60
B00PGGPF00F23	Pontas de Obturação de Guta-Percha ProTaper Gold® Conform Fit® Conjunto F2 e F3	F2, F3 Cone variável	Embalagem de plástico de 60: 40 pontas x F2 20 pontas x F3
B00PGGPF00F45	Pontas de Obturação de Guta-Percha ProTaper Gold® Conform Fit® Conjunto F4 e F5	F4, F5 Cone variável	Embalagem de plástico de 60: 40 pontas x F4 20 pontas x F5

Código	Produto	Tamanho da ponta (formato ISO) Afunilado	Embalagem e conteúdo
B00PNGPF	Pontas de Obturação de Guta-Percha ProTaper Next® Conform Fit®	X2, X3 Cone variável	Caixa de plástico de 60
B00PNGPF00X23	Pontas de Obturação de Guta-Percha ProTaper Next® Conform Fit® Conjunto X2 e X3	X2, X3 Cone variável	Embalagem de plástico de 60: 40 pontas x X2 20 pontas x X3
B00PNGPF00X45	Pontas de Obturação de Guta-Percha ProTaper Next® Conform Fit® Conjunto X4 e X5	X4, X5 Cone variável	Embalagem de plástico de 60: 40 pontas x X4 20 pontas x X5
B00TNGPF	Pontas de Obturação de Guta-Percha TruNatomy® Conform Fit®	Pequeno, Prime, Médio, Grande Cone variável	Caixa de plástico de 60
B00TNGPF00AST	Pontas de Obturação de Guta-Percha TruNatomy® Conform Fit® Tamanhos: Pequeno, Prime e Médio	Pequeno, Prime, Médio Cone variável	Embalagem de plástico de 60: 10 pontas x Pequeno 30 pontas x Prime 20 pontas x Médio
B00TNGPF00AS4	Pontas de Obturação de Guta-Percha TruNatomy® Conform Fit® Tamanhos: Pequeno, Prime, Médio e Grande	Pequeno, Prime, Médio, Grande Cone variável	Embalagem de plástico de 60: 10 pontas x tamanho (Pequeno, Grande) 20 pontas x tamanho (Prime, Médio)
B00WGGPF	Pontas de Obturação de Guta-Percha WaveOne® Gold Conform Fit®	Pequeno, Primário, Médio, Grande Cone variável	Caixa de plástico de 60
B00WGGPF00AST	Pontas de Obturação de Guta-Percha WaveOne® Gold Conform Fit® Tamanho: Pequeno, Médio, Grande e Primário	Pequeno, Primário, Médio, Grande Cone variável	Embalagem de plástico de 60: 10 pontas x tamanho (Pequeno, Médio e Grande) 30 pontas x Primário
M00VRGP	Pontas de Obturação de Guta-Percha VDW.ROTATE®	025.04, 030.04, 035.04, 040.04, 050.04, 025.06, 030.06, 035.06, 040.06	Caixa de plástico de 60
M00VRGPF00AST	Pontas de Obturação de Guta-Percha VDW.ROTATE® Variedade	025.06, 030.04, 035.04, 025.04	Embalagem de plástico de 60: 30 pontas x tamanho 025.06 10 pontas x tamanho (030.04, 035.04, 025.04)
V040258	Pontas de Obturação de Guta-Percha RECIPROC® Blue	R25, R40, R50 Cone variável	Caixa de plástico de 60
V040258028237	Pontas de Obturação de Guta-Percha RECIPROC® Blue Variedade	R25, R40, R50 Cone variável	Embalagem de plástico de 60: 40 pontas x tamanho R25 10 pontas x tamanho (R40, R50)
PULG	Pontas de Obturação de Guta-Percha ProTaper Ultimate® Conform Fit®	F1, F2, F3, FX, FXL Cone variável	Caixa de plástico de 60
PULGAST	Pontas de Obturação de Guta-Percha ProTaper Ultimate® Conform Fit® Variedade	F1, F2, F3 Cone variável	Embalagem de plástico de 60: 10 pontas x tamanho F1 30 pontas x tamanho F2 20 pontas x tamanho F3
V040220	Pontas de Guta-Percha Mtwo®	035.04, 040.04, 045.04, 050.04, 060.04, 030.05, 025.06, 030.06, 035.06, 040.06, 025.07	Caixa de plástico de 60

Código	Produto	Tamanho da ponta (formato ISO) Afunilado	Embalagem e conteúdo
V040220028457	Pontas de Guta-Percha Mtwo® Variedade	025.06, 030.05, 035.04, 040.04, 025.07	Embalagem de plástico de 60 em compartimentos: 20 pontas x tamanho (025.06) 10 pontas x tamanho (030.05, 035.04, 040.04, 025.07)
V040214	Pontas de Guta-Percha RECIPROC®	R25, R40, R50	Caixa de plástico de 60
V040214028237	Pontas de Guta-Percha RECIPROC® Variedade	R25, R40, R50	Embalagem de plástico de 60 em compartimentos: 40 pontas x tamanho R25 10 pontas x tamanho (R40, R50)
V040521 V040522	Pontas de Guta-Percha Alpha	015.04, 020.04, 025.04, 030.04, 035.04, 040.04, 015.06, 020.06, 025.06, 030.06, 035.06, 040.06	Caixa de plástico de 60
V040521028230 V040522028230	Pontas de Guta-Percha Alpha Variedade	015.04, 020.04, 025.04, 030.04, 035.04, 040.04, 015.06, 020.06, 025.06, 030.06, 035.06, 040.06	Embalagem de plástico de 60 em compartimentos: 10 pontas x tamanho (015, 020, 025, 030, 035, 040)
V010542	Pontas de Guta-Percha Conven- cionais	xx fina (XXF), x fina (XF), fina (F), média (M), grande (L)	Caixa de plástico de 100
V020542	Pontas de Guta-Percha Conven- cionais	xx fina (XXF), x fina (XF), fina (F), média (M), grande (L)	Caixa de plástico de 100
V030542	Pontas de Guta-Percha Conven- cionais	xx fina (XXF), x fina (XF), fina (F), média (M), grande (L)	Caixa de plástico de 100
V010542020477 V020542020477 V030542020477	Pontas de Guta-Percha Conven- cionais Tamanhos do conjunto XF, F, M, L	x fina (XF), fina (F), média (M) e grande (L)	Embalagem de plástico de 100 em compartimentos: 1 compartimento x 25 pontas x ta- manho

5 COMPOSIÇÃO

Pontas de Guta-Percha ProTaper® Universal, Mtwo® e RECIPROC®

A composição abaixo é aplicável apenas ao seguinte: REF. A022X, V040220, V040521, V040522.

- Componentes:
 - Óxido de Zinco (60 - 75%)
 - Guta-Percha Sintética (18 - 25%)
 - Sulfato de Bário (5 - 10%)
 - Pigmentos (0,005 - 1%)
 - Componentes restantes (< 15%)

Pontas de Guta-Percha Normalizadas pela ISO, Auxiliares e Convencionais

A composição abaixo é aplicável apenas ao seguinte: REF. A022C, A022E, A022F, A022G, A022L, A022M, A022N, V010542, V020542, V030542.

- Componentes:
 - Óxido de Zinco (75 - 85%)

- Guta-Percha Sintética (15 - 25%)
- Pigmentos (0 - 3%)
- Componentes restantes (< 4%)

Pontas de Guta-Percha ProTaper Gold®, ProTaper Next®, TruNatomy®, WaveOne® Gold e ProTaper Ultimate® Conform Fit®, RECIPROC® Blue, VDW.ROTATE®

A composição abaixo é aplicável apenas ao seguinte: REF. B00PGG, B00PNG, B00TNG, B00WGG, PULG, V040258, M00VRGP.

- Componentes:
 - Óxido de Zinco (45 - 55%)
 - Guta-Percha Sintética (20 - 30%)
 - Sulfato de Bário (15 - 20%)
 - Dióxido de titânio (1 - 5%)
 - Colorante amarelo (< 2%)
 - Colorante vermelho (< 2%)
 - Componentes restantes (< 10%)

Propriedades físicas e químicas

- Radiopacidade: > 3 mm de espessura equivalente a alumínio
- Temperatura de Fusão: < 100°C (212°F)
- Comprimento nominal: ≥ 28 mm (1,1 pol.)
 - Pontas de Guta-Percha Auxiliares (REF.A022F e A022L): ≥ 24 mm (0,9 pol)
 - Pontas de Guta-Percha Convencionais (REF.V01054, V02054 e V03054): ≥ 20 mm (0,8 pol)

6 DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS

As Pontas de Guta-Percha são usadas em combinação com:

- Espaçadores e Condensadores. Estes instrumentos são usados para garantir que a ponta de gutta-percha é distribuída por todo o sistema do canal radicular.
- Calamus®, BeeFill® e Gutta-Smart™. São dispositivos de aquecimento usados para extrudir o material de gutta-percha para o sistema do canal radicular.
- Gutta-Condensor. Gutta-Condensor é um condensador térmico usado para amolecer e fundir pontas de gutta-percha.
- Os selantes endodônticos, como o AH Plus® Sealer e 2Seal, são usados para revestir as paredes do canal radicular e permanecem na interface entre o canal radicular e o material de gutta-percha.
- Limas de Modelagem e Pontas de Papel. São dispositivos usados para modelar e secar o sistema do canal radicular.

7 NOTAS DE SEGURANÇA

7.1 Avisos

- As Pontas de Guta-Percha são produtos de uso único. Os produtos de uso único não devem ser reprocessados nem reutilizados. A reutilização destes produtos aumenta o risco de contaminação cruzada e/ou quebra.
- O uso dos dispositivos pode levar aos seguintes riscos residuais:
 - Insatisfação do utilizador e atraso no tratamento / desconforto do doente.
 - Retratamento (infecção inicial nunca curada).
 - Nunca foram reportadas consequências de infeção/para a saúde graves para o paciente (ex.: riscos biológicos, como infeção, reação tóxica ou alérgica para o paciente) e são muito improváveis, mas não podem ser totalmente excluídas.
 - Fratura do dente devido a instrumentos de obturação.

7.2 Precauções

- A segurança e a eficácia do uso não foram estabelecidas em mulheres grávidas, lactantes ou em crianças.
- Inspeccionar a embalagem e o produto antes de usar: se a embalagem ou o produto estiverem danificados, não use o produto e descarte-o.
- Usar um sistema de dique de borracha durante o procedimento endodôntico.
- Para sua própria segurança, use equipamento de proteção individual (luvas, óculos, máscara).
- Não esterilizar com calor.
- Não usar soluções desinfetantes que contenham fenol ou quaisquer produtos que não sejam compatíveis com guta-percha.

7.3 Reações adversas / Efeitos colaterais indesejáveis

- O desconforto pós-operatório temporário pode surgir geralmente como resultado do tratamento do canal radicular.

7.4 Condições de armazenamento / Manuseio

- Manter afastado da luz solar e do calor.
- Manter à temperatura ambiente ($\leq 30^{\circ}\text{C}$ (86°F)).
- Armazenar em local seco.

8 INSTRUÇÕES PASSO A PASSO

As Pontas de Guta-Percha descritas fazem parte de um sistema completo e só devem ser usadas em combinação com as limas de modelagem e pontas de papel correspondentes (excluindo as pontas normalizadas pela ISO, convencionais e auxiliares). São identificáveis pela marca do sistema, nome do tamanho e código de cor.

As Pontas de Guta-Percha só devem ser usadas em ambiente clínico ou hospitalar, por profissionais dentistas qualificados. Após a instrumentação e limpeza do canal radicular, a técnica de obturação deve ser definida pelo profissional.

Este procedimento inclui o uso de pontas de guta-percha e de vedante.

- 1) As Pontas de Guta-Percha selecionadas serão provenientes do mesmo sistema de modelação e corresponder ao código de cores e ao tamanho da lima de modelação do último instrumento usado durante a preparação do canal. A ponta se ajustará ao tamanho apical do último instrumento usado e deverá ser sentida uma leve fricção ao retirar (puxar para trás).
- 2) As pontas devem ser desinfetadas antes do uso (consultar a seção [9]).
- 3) Pode-se usar um instrumento aquecido para amolecer o material e garantir uma vedação e uma adaptação perfeitas do canal radicular.
- 4) Ao usar um instrumento aquecido, siga as instruções de uso do referido instrumento.
- 5) Use uma ferramenta adequada para cortar as Pontas de Guta-Percha, incluindo o anel de código de cor, se houver, após a inserção da Ponta de Guta-Percha no canal radicular. O anel colorido não deve permanecer no canal radicular após a inserção.

9 PROCESSAMENTO: INSTRUÇÕES DE HIGIENE, LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO

- As Pontas de Guta-Percha são destinadas a um único uso.
- As Pontas de Guta-Percha são dispositivos não esterilizados. Siga as instruções abaixo para desinfecção:
 - Mergulhe as Pontas de Guta-Percha em uma solução de 5,25% de NaOCl durante 1 a 5 minutos à temperatura ambiente.
 - Remova todas as bolhas de ar da superfície das Pontas de Guta-Percha.
 - Limpe suavemente as Pontas de Guta Percha com gaze esterilizada e umedecida com álcool isopropílico 70%.
 - Deixe as Pontas de Guta-Percha secar ao ar.
 - Não usar soluções desinfetantes que contenham fenol ou quaisquer produtos que não sejam compatíveis com guta-percha.
- Para outros produtos listados nestas Instruções de Utilização, siga as instruções de processamento do fabricante.
 - Seguir as Instruções Gerais de Processamento de Produtos Endodônticos (bulario.dentsplysirona.com.br) para os passos de desinfecção, limpeza e esterilização.

10 ELIMINAÇÃO SEGURA DO APARELHO

Os produtos devem ser descartados de acordo com os regulamentos locais para a eliminação segura para dispositivos cortantes e contaminados.

11 DATA DE VALIDADE

Não usar após a data de validade indicada no rótulo.

12 REGISTRO DE INCIDENTES GRAVES

Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente, de acordo com os regulamentos locais.

13 GARANTIA E RECURSO LIMITADO / LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Isenção de Responsabilidade: As Instruções de Uso foram validadas pela Dentsply Sirona. Os usuários são os únicos responsáveis por qualquer incumprimento destas instruções e/ou pelo uso de métodos alternativos para tratamento endodôntico e/ou processamento, quando aplicável. A Dentsply Sirona não assume qualquer responsabilidade por danos, lesões ou qualquer responsabilidade legal incorrida direta ou indiretamente pelo usuário devido a um desvio das Instruções de Uso especificadas mais abaixo. O usuário deve seguir as práticas de segurança e jurídicas, incluindo, sem se limitar, às definidas neste documento.

14 RESUMO DE SEGURANÇA E DESEMPENHO CLÍNICO

A informação estará disponível tanto na base de dados europeia sobre dispositivos médicos (EUDAMED) como no site da IFU, onde estará ligada à UDI-DI básica.

EUDAMED

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Instruções de Uso

bulario.dentsplysirona.com.br

- Pontas de Guta-Percha ProTaper® Universal, Mtwo® e RECIPROC®
O número UDI-DI básico é: ++J00310041DT
- Pontas de Guta-Percha Normalizadas pela ISO, Convencionais e Auxiliares
O número UDI-DI básico é: ++J00310042DV
- Pontas de Guta-Percha ProTaper Gold®, ProTaper Next®, TruNatomy®, WaveOne® Gold e ProTaper Ultimate® Conform Fit®, RECIPROC® Blue, VDW.ROTATE®
O número UDI-DI básico é: ++J00310043DX

15 INFORMAÇÃO ADICIONAL

Consulte o site bulario.dentsplysirona.com.br para:

- Obter uma cópia impressa gratuita das Instruções de Uso.
- Obter uma explicação dos símbolos não harmonizados para Instruções de Uso e rótulos.

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão dessas Instruções de uso com o produto adquirido indicado na embalagem. Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao nosso SAC através do 0800 771 2226 (Somente no Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com

Detentor da Notificação



SIRONA DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Rua Sen. Carlos Gomes de Oliveira, nº 863, CD 02,
Un. 63 – Distrito Industrial – São José/SC - CEP 88104-785
SAC 0800-771-2226 / (11) 3046-2222 (Brasil)
ANVISA Nº: 80745409042

www.dentsplysirona.com.br

Fabricante



Maillefer Instruments Holding Sàrl
Chemin du Verger 3
1338 Ballaigues
Switzerland



bulario.dentsplysirona.com.br